



Unité de prélèvement à ailettes sécurité BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button


Recommandations d'utilisation

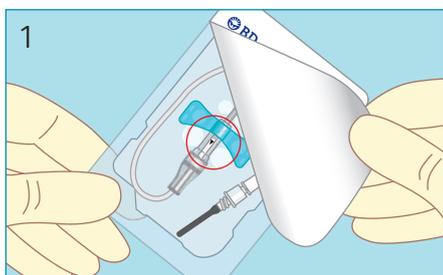


Attention, à l'ouverture de l'emballage, saisir le dispositif par son embase pour ne pas déclencher la rétraction de l'aiguille en appuyant sur le bouton avec le triangle noir.
Visser le corps de prélèvement sur l'adaptateur et s'assurer que celui-ci est bien emboîté dans l'embase blanche.

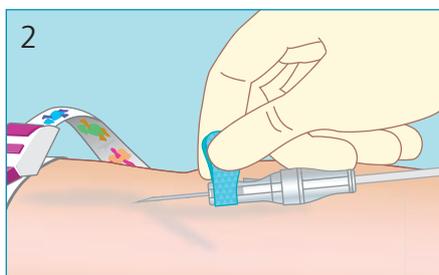

Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille en le faisant tourner puis en le tirant.
Maintenir l'unité à prélèvement par les ailettes, entre le pouce et l'index, afin d'introduire l'aiguille dans la veine.

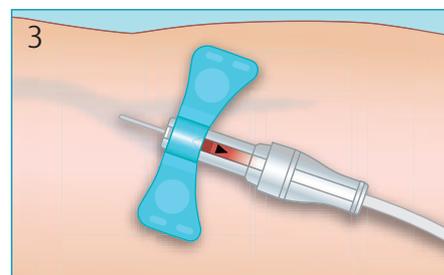


Une fois l'aiguille dans la veine, le reflux sanguin est immédiatement visible au niveau de l'embase du dispositif, à l'arrière des ailettes.

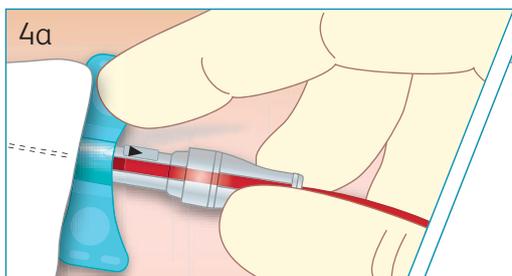


Ne pas dépiquer l'aiguille de la veine.

Placer une compresse au dessus de l'aiguille, en la maintenant latéralement, sans exercer de pression.
Faire en sorte qu'elle recouvre la partie avant du dispositif. Maintenir le dispositif par l'embase entre le pouce et le majeur.

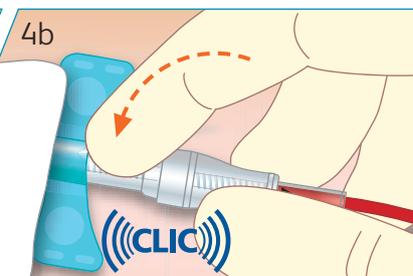

Avec l'index, appuyer sur le bouton poussoir (triangle noir) afin d'activer automatiquement le retrait de l'aiguille de la veine.
Un "clic" sonore confirme le retrait et la neutralisation de l'aiguille.
Comprimer le point de ponction avec la compresse.

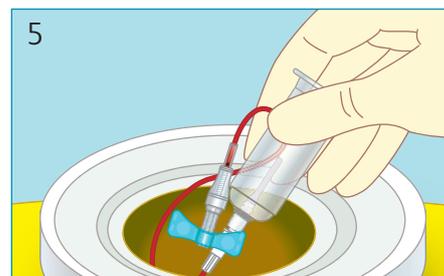

Vérifier que l'aiguille est entièrement rétractée et neutralisée.
Éliminer l'ensemble du système dans un collecteur adapté pour objets piquants, coupants, tranchants.

Réf	Descriptif	Couleur	Tubulure	Conditionnement
367393	19 mm x 8/10 - 21G		178 mm	200 (4 x 50)
367392	19 mm x 6/10 - 23G		178 mm	200 (4 x 50)
367391	19 mm x 5/10 - 25G		178 mm	200 (4 x 50)

Unités à ailettes sécurité BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button, stériles, à usage unique, pour prélèvement de sang veineux, biseau PentaPoint™ et paroi RightGauge™, activation par bouton poussoir. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/CE), CE 0050. Mandataire UE : BD Plymouth, UK. Mandataire UE : BD Plymouth, UK. Pour un bon usage de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Pris en charge par l'assurance maladie.

Suisse:
BD · Binningerstrasse 94 · 4123 Allschwil · Tél. 061 485 22 22

bd.com

