



Une nouvelle génération de tubes



BD Vacutainer® Barricor™ Plasma
Tube à prélèvement de sang
avec séparateur mécanique

- Pour le recueil, la séparation, le transport et la manipulation des échantillons
- Conçu pour l'obtention d'un échantillon de plasma de qualité pour les analyses de chimie
- Pour un usage de diagnostic *in vitro*

Tube BD Vacutainer® Barricor™ Plasma conçu pour optimiser la qualité et le délai d'obtention des échantillons de plasma hépariné.

RECUEIL



Pendant le recueil du sang, le séparateur demeure au sommet du tube. Son orientation permet au sang de s'écouler.

CENTRIFUGATION



Sous l'effet de la force centrifuge, la partie élastomère du séparateur s'étire, lui permettant de migrer dans la colonne de sang.



Le séparateur mécanique utilise le principe de la flottabilité différentielle pour se positionner pendant la centrifugation.




Quand la centrifugation ralentit, l'élastomère reprend sa forme initiale, formant une barrière étanche entre le plasma et les cellules sanguines.

Le séparateur mécanique se positionne durant la centrifugation et permet l'obtention d'un échantillon de plasma de qualité

Quand l'élastomère du séparateur est étiré, l'espace ainsi créé avec la paroi interne du tube permet aux cellules sanguines de sédimenter, tout au long de la centrifugation.

C'est ce qui différencie les technologies BD Barricor™ et gel séparateur.

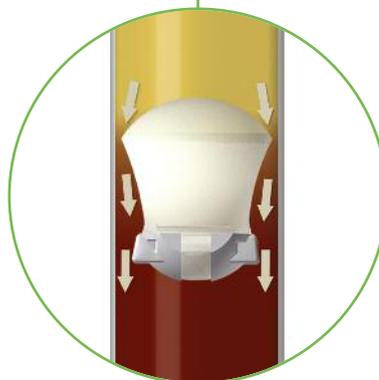

- Réduit le taux de plaquettes dans l'échantillon de plasma.*
- Centrifugation possible en 3 minutes à 4 000 g.

CARACTÉRISTIQUES

Héparine de Lithium 17 UI/mL - Bouchon sécurité BD Hemogard™ vert citron

Réf	365031	365035	365030	365033	365039	365040
Format	13*75	13*75	13*100	13*100	13*100	13*100
Vide	3 mL	3 mL	4,5 mL	4,5 mL	5,5 mL	5,5 mL
Etiquette	Papier	Sérigraphie	Papier	Sérigraphie	Papier	Sérigraphie

BD Vacutainer Barricor Plasma, tubes à prélèvement de sang, sous vide, stériles, à usage unique, avec séparateur mécanique, pour l'obtention de plasma hépariné. Dispositif de Diagnostic In Vitro Non annexe II (directive 98/79/CE). Mandataire UE : BD Plymouth, UK. Pour un bon usage de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Pris en charge par l'assurance maladie.

* BD, Evaluation of Specimen Quality in BD Vacutainer Barricor Tubes with Respect to Visual Observations and Cell Counts in Plasma as Compared with BD Vacutainer PST II Tubes, VS9195, 2016.

Pour en savoir plus : infoch@bd.com

BD, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil, Suisse

bd.com/ch

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros.

© 2016 BD. BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. Flyer_Barricor - 06/16 - AB•Com

