


Tubes BD Vacutainer® en polymères Citrate 9NC

2,7 ml (vide) - 3 ml (total)

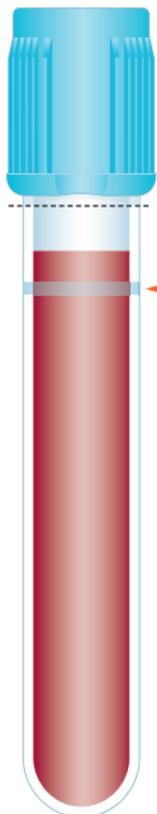


Indicateur de remplissage minimum*
Bande dépolie tout autour du tube

Correspond au volume minimum de sang recommandé (-10%).

* Recommandations CLSI H1-A6 et GFHT 2015 (www.geht.org)

1,8 ml (vide) - 2 ml (total)

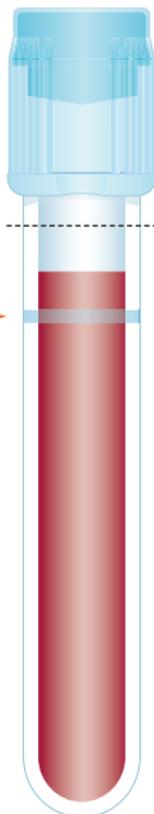

Volume maximum (+10%)

Le volume de sang prélevé est suffisant s'il se situe au-dessus ou au niveau de l'indicateur de remplissage minimum.

Mesures fournies à titre indicatif : pour une mesure précise, utiliser une méthode par pesée.



Visibilité à 360° de l'indicateur de remplissage minimum



Minimiser les variables préanalytiques en hémostasie

- Assembler l'aiguille et le corps de prélèvement. Réaliser la ponction. Insérer le tube dans le corps et le percuter fermement sur l'aiguille perce-bouchon (*voir recommandations d'utilisation sur la boîte*).
- Maintenir le bras du patient incliné vers le bas, le tube en dessous du point de ponction.
- Garrot peu serré, maintenu moins d'une minute. Le relâcher dès que le sang s'écoule dans le tube.
- Laisser le tube se remplir complètement, jusqu'à l'arrêt du flux sanguin.
- L'indicateur minimum de remplissage correspond au volume minimum de sang recommandé (-10%).
- Si seul un tube citrate est prélevé avec une unité de prélèvement à ailettes, un tube sans additif doit être prélevé en 1^{ère} position. Il est important d'éliminer le volume d'air contenu dans la tubulure pour permettre un remplissage adéquat du tube citrate.*
- Si l'échantillon a été prélevé avec une seringue, le transférer dans le tube BD Vacutainer® Citrate avec un Dispositif de transfert (réf 364810).
- Immédiatement après le prélèvement, homogénéiser le tube par 3-4 retournements lents.

**Recommandations CLSI H1-A6 et GFHT 2015 (www.geht.org)*

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 63 356 160 euros. RCS Grenoble B 056 501 711
Siret 056 501 711 00115. © 2018 BD, BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company.
ME_9NCPol_Fillline_04/18 - AB•Com

